

Bedienung eines Defibrillators - Wie handle ich richtig?

Den **LIFEPACK CR Plus Defibrillator**, sowie einen **Erste-Hilfe-Kasten** und einen **Feuerlöscher** finden Sie im Vorraum zur Gemeinschaftspraxis Dr. Ernst und Dr. Lahnsteiner, Dr. Schwab, Rosenegg 48a, 6391 Fieberbrunn



Die Türe zu diesem Vorraum ist **während der Praxiszeiten geöffnet**.



Außerhalb der Öffnungszeiten ist dieser Raum über die Büroräume der Fuschlberger GmbH & Co KG erreichbar oder **schlagen Sie den Nottüröffner ein.**

(nach dem Einschlagen der Scheibe des Nottüröffners wird die automatische Videoüberwachung aktiviert).

Wie Sie beim plötzlichen Herztod reagieren müssen

Ein nicht behandelter Herzstillstand führt zum Tod des Betroffenen. Beim plötzlichen Herztod müssen Sie zunächst Hilfe anfordern (d. h. einen Notruf absetzen) und sich die entsprechenden Rettungsmaßnahmen ins Gedächtnis rufen.


Grundlegende Schritte bei der Verwendung des LIFEPACK CR Plus Defibrillators

Zur Rettung eines vom plötzlichen Herztod betroffenen Menschen mit Hilfe des LIFEPACK CR Plus

Defibrillators müssen Sie die folgenden Schritte durchführen:




Überzeugen Sie sich davon, dass wirklich ein Herzstillstand vorliegt. Stellen Sie den LIFEPACK CR Plus Defibrillator in die Nähe des Patienten, und drücken Sie die Taste **ABDECKUNG ÖFFNEN/EIN-AUS**, um die Abdeckung zu öffnen und den Defibrillator einzuschalten. Die Abfolge der Sprachaufforderungen beginnt und leitet Sie bei der Behandlung des plötzlichen Herztods an.

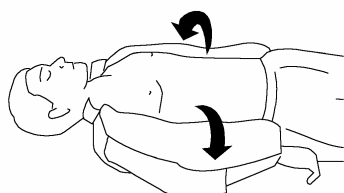


Entblößen Sie die Brust des Patienten. Wenn der Patient eine starke Brustbehaarung aufweist, rasieren Sie die Haare an den späteren Elektrodenpositionen weg. Wenn die Brust des Patienten schmutzig oder nass ist, wischen Sie sie ab.




Drücken Sie mit einer Hand auf die linke Seite des Elektrodenpakets, und ziehen Sie mit der anderen Hand am roten Öffnungsgriff des Elektrodenpakets. Das Elektrodenpaket wird dadurch aufgerissen. Öffnen Sie das Paket vollständig, und nehmen Sie die Elektroden heraus. Ein kleines Stück des Pakets bleibt mit dem Defibrillator verbunden.

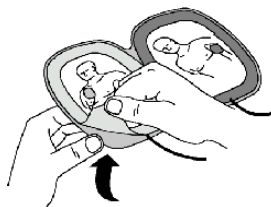


Lösen Sie die Elektroden einzeln, nacheinander, von der blauen Kunststoffolie.

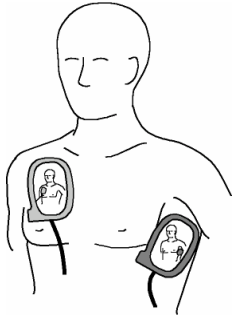


Befestigen Sie die Elektroden wie abgebildet an der entblößten Brust des Patienten.

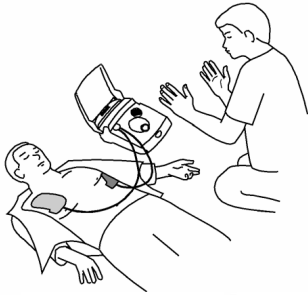

Achten Sie auf die Sprachaufforderungen, und berühren Sie den Patienten erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

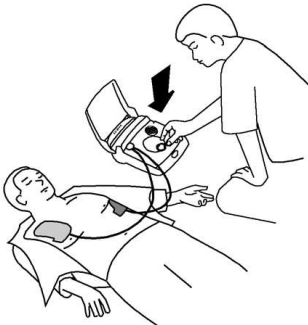

Überzeugen Sie sich immer davon, dass niemand den Patienten berührt und dass keine Gegenstände mit dem Patienten in Kontakt stehen, bevor Sie auf die entsprechende Sprachaufforderung hin die Taste **SCHOCK** drücken (beim halbautomatischen Modell), bzw. wenn der Defibrillator meldet, dass er gleich einen Schock abgeben wird (automatisches Modell).

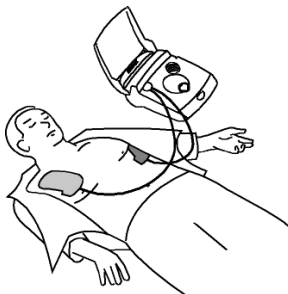

Lassen Sie die Elektroden am Patienten befestigt und am Defibrillator angeschlossen, falls sich der Patient wieder bewegen oder seine Atmung wieder einsetzen sollte. Wenn möglich, bringen Sie den Patienten beim Wiedereinsetzen der Vitalfunktionen in die stabile Seitenlage, wie sie es in Ihrem Erst-Hilfe-Ausbildung gelernt haben.

Nach Anweisung des Geräts wechseln Sie zwischen Defibrillation und Herz-Lungen-Wiederbelebung!

Bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung die Elektroden am Körper lassen. Das Gerät überprüft alle zwei Minuten ob ein Schock ausgelöst werden muss oder nicht. Deshalb darauf achten, wenn das Gerät wieder Anweisungen gibt.

Warum soll ich so handeln?

- Der Defibrillator kann eventuelle vorliegende Herzrhythmusstörungen stoppen.
- Wenn das Herz sofort wieder normal schlägt, kann es wieder Blut pumpen und somit den Körper mit Sauerstoff versorgen.
- Falls das Herz nicht sofort wieder schlägt, kann durch die [Herz-Lungen-Wiederbelebung](#) zu einer normalen Tätigkeit angeregt werden. Eine Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff ist schon nach wenigen Minuten lebensgefährlich!